

## **Questions fréquemment posées**

### **Puis-je utiliser les lancettes OneTouch UltraSoft® ou d'autres lancettes avec le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus?**

Non. Le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus ne peut être utilisé qu'avec les lancettes OneTouch® Delica® Plus et OneTouch® Delica®.

### **Puis-je continuer à utiliser mon stylo autopiqueur OneTouch® Delica®? Les lancettes seront-elles encore offertes?**

Oui. Vous pouvez continuer à utiliser votre stylo autopiqueur OneTouch® Delica®.

Les lancettes OneTouch® Delica® seront progressivement éliminées et remplacées par les nouvelles lancettes OneTouch® Delica® Plus. Ces nouvelles lancettes seront compatibles avec le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® et le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus.

### **Il me reste des lancettes OneTouch® Delica® non utilisées. Que devrais-je en faire?**

À condition que les lancettes ne soient pas périmées, elles peuvent être utilisées avec votre stylo autopiqueur OneTouch® Delica® ou OneTouch® Delica® Plus.

Pour éviter de contracter une infection, n'utilisez pas les lancettes après la date de péremption imprimée sur l'emballage des lancettes.

### **Puis-je utiliser une lancette plus d'une fois?**

Pour aider à réduire le risque d'infection, utilisez une lancette neuve et stérile chaque fois que vous effectuez un test.

La réutilisation d'une lancette peut émousser ou faire courber la pointe de la lancette, ce qui risque de causer une lésion cutanée, une cicatrice et plus de douleur. Ne vous servez jamais d'une lancette ou d'un stylo autopiqueur qu'une autre personne a utilisé. Jetez toujours la lancette usagée dans un contenant pour objets pointus ou contaminés.

### **Qu'est-ce qui distingue le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus du stylo autopiqueur OneTouch® Delica®?**

La vibration de la lancette utilisée avec le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus est réduite de plus de 50 % par rapport au stylo autopiqueur OneTouch® Delica®\*. Cela assure un prélèvement en douceur plus précis\*.

Les tests effectués avec le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus sont également moins douloureux que ceux effectués avec le stylo autopiqueur OneTouch® Delica®†.

Les treize (13) réglages de profondeur de piqûre vous permettent de personnaliser les tests pour assurer votre confort.

**La mention « Treize (13) réglages de profondeur de piqûre pour un confort personnalisé » figure sur l’emballage du stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus. Qu’est-ce que cela signifie?**

Le dispositif dispose de treize (13) réglages pour la profondeur de ponction. Chaque point affiché entre les chiffres de 1 à 7 sur la roulette de réglage de la profondeur indique un réglage de profondeur supplémentaire offert. Vous pouvez régler la profondeur en tournant la roulette de réglage de la profondeur. Les plus petits chiffres sont destinés à des ponctions moins profondes et les chiffres supérieurs à une ponction plus profonde.

Essayez d’abord des réglages assurant des ponctions moins profondes et augmentez la profondeur jusqu’à ce que vous atteigniez une profondeur suffisante pour pouvoir prélever le bon volume d’échantillon sanguin (voir les instructions accompagnant votre lecteur).

Le réglage que vous choisissez doit fournir une ponction assez profonde pour obtenir une goutte de sang ronde assez volumineuse qui permettra d’obtenir un résultat exact avec votre lecteur (consultez le manuel d’utilisation livré avec votre système pour des renseignements sur le prélèvement d’un échantillon de sang de taille appropriée).

**Quelle est la marche à suivre pour utiliser le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus?**

Préparez le stylo autopiqueur en effectuant les étapes suivantes :

- Retirez l’embout du stylo autopiqueur.
- Insérez une lancette stérile dans le stylo autopiqueur et retirez le couvercle de protection.
- Remettez en place l’embout du stylo autopiqueur.
- Ajustez le réglage de la profondeur.
- Pour armer le stylo autopiqueur, ramenez la commande coulissante jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

Une fois la préparation du stylo autopiqueur terminée, suivez les étapes suivantes pour effectuer un test :

- Maintenez fermement le stylo autopiqueur sur le côté de votre doigt.
- Appuyez sur le bouton déclencheur pour effectuer la ponction.
- Suivez les instructions du manuel de votre lecteur ou système pour appliquer l’échantillon de sang correctement.
- Retirez l’embout du stylo autopiqueur.
- Couvrez la pointe exposée de la lancette avec le couvercle de protection.
- Éjectez la lancette.
- Remettez en place l’embout du stylo autopiqueur.

Pour en savoir plus, consultez les instructions détaillées accompagnant la trousse de détail.

### **Comment dois-je éliminer une lancette usagée?**

Éliminez avec précaution la lancette usagée immédiatement après son utilisation pour éviter les blessures involontaires par piqûre avec la lancette. Les lancettes usagées peuvent être considérées comme des déchets biologiques dangereux dans votre région.

Veillez à bien suivre les recommandations de votre professionnel de la santé ou les règlements locaux en vigueur pour une élimination appropriée.

### **Quelles sont les conditions de conservation du stylo autopiqueur?**

Il n'y a pas de conditions de conservation particulières. Conservez-le avec l'étui de transport livré avec votre système. Attention : Gardez le stylo autopiqueur hors de la portée des jeunes enfants. Le stylo autopiqueur, son embout, les lancettes et les couvercles de protection des lancettes présentent des risques de suffocation.

### **Quelles mesures dois-je prendre pour réduire le risque d'infection?**

- Veillez à laver le site de ponction avec de l'eau et du savon avant le prélèvement.
- Ne partagez jamais une lancette ou un stylo autopiqueur avec une autre personne. Votre lecteur n'est destiné qu'à un seul patient.
- Utilisez toujours une lancette stérile neuve (les lancettes sont à usage unique). Ne les réutilisez pas.
- Gardez votre stylo autopiqueur propre.
- N'utilisez pas les lancettes après la date de péremption imprimée sur l'emballage des lancettes.