


Pour commencer à utiliser l'application Web OneTouch Reveal®

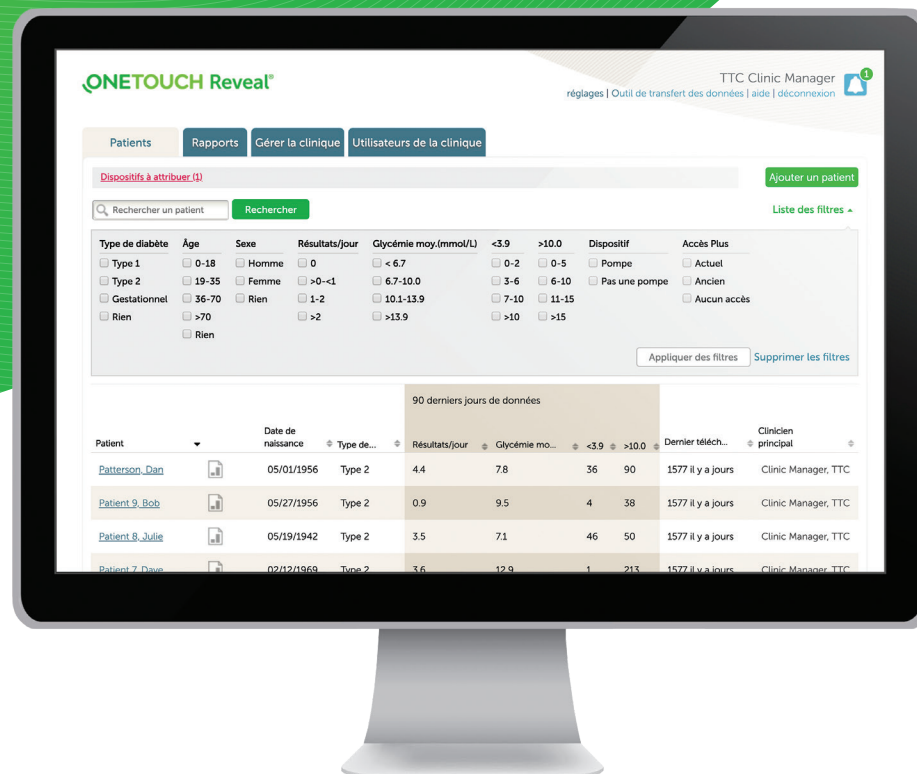


Guide de formation



Pour les professionnels de la santé uniquement

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 LifeScan IP Holdings, LLC.
Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-WDM-2000012

ONETOUCH
à vos côtés pour avancer^{MC}

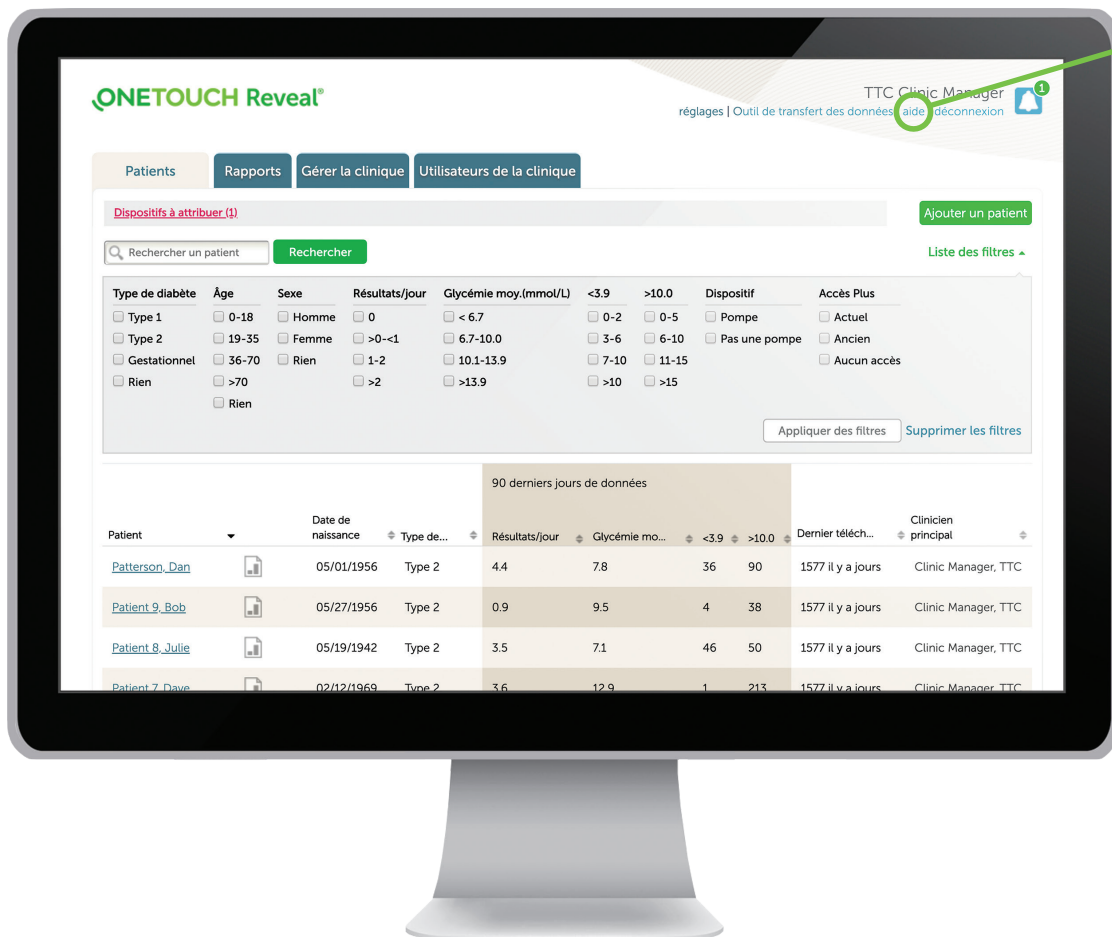

Avant de commencer à utiliser cette application, lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'application Web OneTouch Reveal® destinée aux professionnels de la santé. La version électronique est disponible en cliquant sur Aide depuis votre compte de clinique.

L'application Web OneTouch Reveal® classe les utilisateurs dans l'un des trois rôles suivants :

- Patient**
- Utilisateur de la clinique**
- Gestionnaire de la clinique**

L'information est regroupée sous quatre onglets :

- Patients**
- Rapports**
- Gérer la clinique**
- Utilisateurs de la clinique**

Certains onglets ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs.

Ce guide sur l'application Web fournit des instructions sur chacun des onglets et explique comment utiliser le lien Réglages pour définir vos préférences.

Pour les professionnels de la santé uniquement

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 LifeScan IP Holdings, LLC. Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-WDM-2000012

ONETOUCH[®]
à vos côtés pour avancer^{MC}

Page de vue d'ensemble des données des patients

Patients : Onglet Patients et écran de navigation principal.

Rapports : Visualisation/impression des rapports.

Gérer la clinique : Cet onglet n'est accessible qu'au gestionnaire de la clinique. Définit les plages d'objectifs de glycémie et les documents à imprimer par défaut pour les pompes et les lecteurs de la clinique.

Utilisateurs de la clinique : Cet onglet n'est accessible qu'au gestionnaire de la clinique. Ajout/modifications des utilisateurs de la clinique.

Nom : Utilisateur actuellement connecté.

Réglages : Pour modifier le profil, les plages d'objectifs, les rapports par défaut de la pompe/du lecteur de l'utilisateur actuellement connecté (et non pour toute la clinique).

Outil de transfert des données : Installation de l'outil de transfert des données (doit être effectuée une seule fois).

Aide : Manuel d'utilisation, coordonnées du service à la clientèle.

Quitter : Ferme la session de l'utilisateur actuel.

ONETOUCH Reveal®

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Dispositifs à attribuer (1)

Rechercher un patient

Rechercher

Ajouter un patient

Liste des filtres

Liste des filtres relatifs à la gestion des populations de patients :

Affiche une série de filtres (type de diabète, âge, sexe, etc.) qui permet aux utilisateurs de la clinique de sélectionner les patients qu'ils souhaitent voir afficher ci-dessous.

Demandes de partage : Affiche toutes les demandes des patients pour partager leurs renseignements avec la clinique. Option pour Confirmer ou Refuser.

Dispositifs à attribuer : Affiche tous les dispositifs qui doivent être attribués (du concentrateur 2net ou de l'outil de transfert des données) à un patient particulier. Option pour Attribuer ou Retirer.

		90 derniers jours de données					
le...	Résultats/jour	Glycémie mo...	<3.9	>10.0	Dernier téléch...		
2	4.4	7.8	36	90	1577 il y a jour		
2	0.9	9.5	4	38	1577 il y a jour		
Patient 6_Sam	09/19/1972	Type 2	3.5	7.1	46	50	1577 il y a jour
Patient 7_Dave	02/12/1969	Type 2	3.6	12.9	1	213	1577 il y a jour
Patient 6_Pete	01/22/1983	Type 2	3.4	12			
Patient 5_Brenda	06/17/1980	Type 2	3.4	12			
Patient 4_Jack	03/01/1982	Type 2	2.9	8.7			
Patient 3_Kate	05/01/1987	Type 2	5.8	8.3			
Patient 2_Dan	04/15/1942	Type 2	4.4	7.8			
Patient 1_Dora	02/17/1965	Type 2	1.7	11.1			

Nom du patient (hyperlien) : Affiche les renseignements sur le patient, les plages d'objectifs et le créneau horaire. Peut également être utilisé pour transférer le patient d'un professionnel de la santé à un autre, ou le retirer complètement.

Visualisation des rapports : Atteint la page des rapports de ce patient (la façon la plus rapide d'accéder aux rapports).

Ouverture de la vue d'ensemble des données du patient : Ouvre l'application Web OneTouch Reveal® destinée aux patients dans une nouvelle fenêtre pour voir exactement ce que le patient voit chez lui, à l'écran de son ordinateur.

Ajouter un patient

The screenshot shows the 'Ajouter un nouveau patient' form in the TTC Clinic Manager interface. The form includes a consent checkbox, a date of birth selector, radio buttons for diabetes type and gender, and fields for electronic and postal addresses. A summary box at the bottom shows the entered information: 'Sexe: Homme', 'ID du patient:', and 'Langue : Français'. A callout points to an 'Imprimer le résumé de l'inscription' button.

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager
réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Demands des patients (1) | Ajouter un patient

* J'ai lu, je comprends et j'accepte la clause d'exclusion de responsabilité ci-dessus.

Ajouter un nouveau patient

Nom de famille: * | Prénom: * | 2e prénom/initiale: *

Date de naissance: *
3/5/2002

Type de diabète: *
 Type 1
 Type 2
 Gestationnel

Sexe: *
 Homme
 Femme

Adresse électronique

Adresse électronique: * | Confirmer l'adresse électronique: *

Or

Adresse postale

ID du patient:

Langue
English

Ajouter un patient

Sexe: Homme
ID du patient:
Langue : Français

Imprimer le résumé de l'inscription

S'il s'agit d'un nouveau patient : Cliquez sur le bouton Ajouter un patient dans l'onglet Patients.

- Le **consentement relatif à l'avis de non-responsabilité du professionnel de la santé** s'ouvrira.
- Téléchargez et imprimez le **formulaire de consentement du patient** pour obtenir la signature par le patient.
- Cochez la case « J'ai lu, j'ai compris et j'accepte l'avis de non-responsabilité ci-dessus ».

OU

Accepter une demande de patient : En cliquant sur l'hyperlien Demands du patient, puis sur Accepter.

Pour ajouter un nouveau patient à l'application Web OneTouch Reveal®, entrez les renseignements suivants :

- Nom de famille** et **prénom**
- Date de naissance**
- Type de diabète**
- Sexe**
- Adresse électronique**
- Renseignements facultatifs :
 - Identifiant du patient
 - Définir les renseignements facultatifs sur le patient
- Cliquez sur **Ajouter un patient**.

Cliquez sur **Imprimer le résumé** de l'inscription sur la page suivante.

Ouverture du rapport d'un patient

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rappports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Dispositifs à attribuer (1)

Rechercher un patient Rechercher

Ajouter un patient

Liste des filtres

90 derniers jours de données

Patient	Date de naissance	Type de...	Résultats/jour	Glycém(mmo...	<3.9	>10.0	Dernier téléch...	Clinicien principal
Patterson, Dan	05/01/1956	Type 2	4.4	7.8	36	90	1577 il y a jours	Clinic Manager, TTC
Patient 4, Jack	3/1/1982	Type 2	0	---	0	0	1549 days ago	Clinic Manager, TTC

Les trois façons de repérer rapidement un patient associé à la clinique :

Compte :

1. Liste des filtres relatifs à la gestion des populations de patients
2. Zone de recherche d'un patient
3. Tri des intitulés par ordre croissant ou décroissant

La façon la plus rapide d'ouvrir les rapports d'un patient : Cliquez sur l'icône de visualisation des rapports.

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rappports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Rechercher un patient Rechercher

<< premier < précédente 1 2 suivant > dernier >>

Patient	ID	Date de naissance	Clinicien principal	Dernier téléchargement
Patterson, Dan	5-01-12	5/1/1956	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am
Patient 9, Bob	TTCCAP 9	5/27/1956	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am
Patient 8, Julie	TTCCAP 8	5/19/1942	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am
Patient 7, Dave	TTCCAP7	2/12/1969	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am
Patient 6, Pete	TTCCAP 6	1/22/1983	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am
Patient 5, Brenda	TTCCAP 5	6/17/1980	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am
Patient 4, Jack	TTCCAP 4	3/1/1982	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am
Patient 3, Kate	TTCCAP 3	5/1/1987	Clinic Manager, TTC	11/10/2015 11:56 am

Une autre façon d'ouvrir les rapports :


1. Cliquez sur l'onglet Rappports.
2. Cliquez sur le nom du patient.

Remarque : Si vous ne voyez pas le nom du patient, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant la zone de recherche en haut de l'écran.

Téléchargement et impression des rapports



Étape 1: Cliquez sur **Télécharger les rapports** dans l'onglet Rapports.

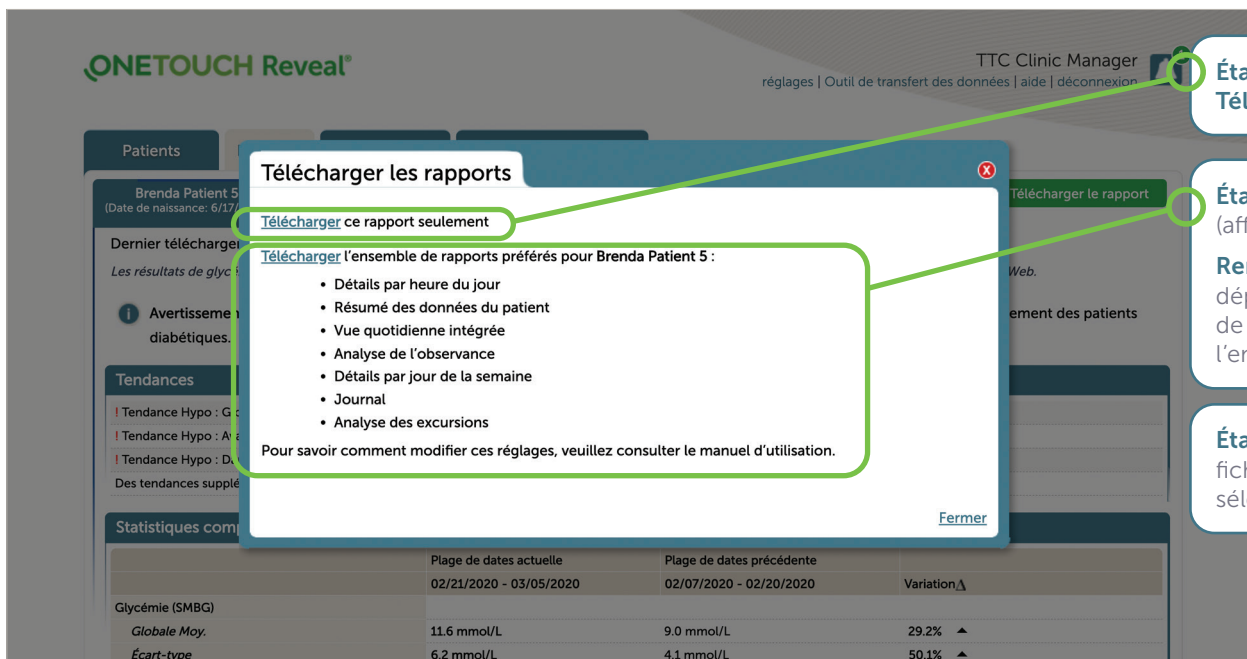

Étape 2a: Pour ne télécharger que le rapport actuel, cliquez sur **Télécharger**.

Étape 2b: Pour télécharger les types de rapports privilégiés (affichés), cliquez sur **Télécharger**.

Remarque : Les types de rapports privilégiés sont définis au départ par le gestionnaire de la clinique, mais les préférences de l'utilisateur de la clinique associées à un patient particulier l'emportent sur ces réglages.

Étape 3: Une fois que vous avez ouvert le fichier PDF, cliquez sur l'onglet **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.

Ajout d'un utilisateur de la clinique ou d'un gestionnaire de la clinique

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager ¹
réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | **Utilisateurs de la clinique**

Trouver un utilisateur Rechercher

Gérer les utilisateurs

<< premier < précédente 1 suivant > dernier >>

Seuls **les gestionnaires** de la clinique peuvent ajouter **des utilisateurs** de la clinique :

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs de la clinique.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager ¹
réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | **Utilisateurs de la clinique**

Choisir un utilisateur

Renseignements généraux

Nom de famille *
Prénom*
2e prénom/initiale
Suffixe
Spécialité
Identifiant professionnel
Langue
English

Coordonnées

Adresse 1*
Adresse 2
Adresse 3
Ville *
Province *
Alberta
Code postal *
Pays: Canada
Numéro de téléphone principal *
Adresse électronique *

OneTouch Reveal®

Nom d'utilisateur *
Mot de passe *
Votre mot de passe doit comporter de 8 à 16 caractères et inclure au moins une lettre et un chiffre.
Confirmer le mot de passe *

Rôle de l'utilisateur

Cet utilisateur est un gestionnaire de la clinique

Sauvegarder Annuler

Une nouvelle page s'ouvrira :

1. Entrez les renseignements généraux concernant cet utilisateur.
2. Entrez les coordonnées de cet utilisateur.
3. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour cet utilisateur.
4. Cochez la case sous **Rôle de l'utilisateur** si le nouvel utilisateur est un gestionnaire de la clinique.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification des réglages (Imprimer le code de clinique)

Gestionnaires de la clinique

Les gestionnaires de la clinique définissent les réglages par défaut pour la clinique :

1. Cliquez sur l'onglet **Gérer la clinique**.
2. Cliquez sur un sous-onglet (p. ex. Rapports du lecteur).

Cliquez sur **Modifier** dans le coin droit.

Effectuez les modifications.

Cliquez sur **Enregistrer**.

Imprimer le code de clinique :

Il peut être fourni aux patients pour lier leur compte OneTouch Reveal® à votre clinique.

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager

réglages Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients Rapports **Gérer la clinique** Utilisateurs de la clinique

Profil Rapports du lecteur Rapports de la pompe Options du rapport

Ma clinique Modifier

Nom de la clinique:
Trident Training Clinic CA

Code de la clinique:
ZD SH YS

Téléphone:
5551231245

Télécopieur:
5553213245

Imprimer les renseignements sur la clinique

Langue Modifier

Langue : Français

Unité de mesure: mmol/L

Émetteurs

ID de l'émetteur:HUB123

Installation outil de transfert des données

L'outil de transfert des données OneTouch Reveal® vous permet de transférer des données des dispositifs du patient (lecteurs de glycémie ou pompes à insuline) vers OneTouch Reveal®. Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour pouvoir télécharger et installer l'outil de transfert de données.

Téléchargez l'outil de transfert de données en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Télécharger l'outil de transfert des données

Utilisateurs de la clinique

Les réglages personnalisés par les utilisateurs de la clinique l'emportent sur les réglages définis par le gestionnaire de la clinique.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur un sous-onglet (p. ex. Rapports du lecteur).
3. Cliquez sur **Modifier** dans le coin droit.
4. Effectuez les modifications.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Objectifs glycémiques

Permet de définir la plage des objectifs glycémiques par défaut pour les types de diabète suivants :

- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Diabète gestationnel

Rapports du lecteur

Permet de définir les réglages par défaut pour les patients qui utilisent un lecteur :

- Rapports imprimés par défaut
- Plage de dates par défaut
- Rapport par défaut affiché à l'écran

Options du rapport

Autres options du rapport :

- Aperçu des résultats de glycémie par heure de la journée dans le rapport Journal.
- Tendances des données de glycémie du patient dans le Résumé des données du patient.
- Présentation des enregistrements de glycémie et d'insuline dans l'ordre où les tests ont été effectués ou de la date enregistrée dans le rapport Liste des données.
- Graphique par heure de la journée des résultats de glycémie, des doses d'insuline et de l'apport en glucides pour une plage de dates donnée.
- Présentation de statistiques telles que les valeurs de glycémie les plus élevées, les plus basses et moyennes par heure de la journée (rapport Détails par heure du jour) ou par jour de la semaine (rapport Détails par jour de la semaine).
- Aperçu du contrôle glycémique de la période considérée actuelle par rapport à la période considérée précédente (progrès du patient) pour une plage de dates donnée (en supposant que les données sont disponibles) dans le Résumé des données du patient.

Modification du profil d'un patient

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Dispositifs à attribuer (4) Ajouter un patient

Rechercher un patient Rechercher Liste des filtres

90 derniers jours de données

Patient	Date de naissance	Type de...	Résultats/jour	Glycémie mo...	<3.9	>10.0	Dernier téléch...	Clinicien principal
Patterson, Dan	05/01/1956	Type 2	4.4	7.8	36	90	1577 il y a jours	Clinic Manager, TTC

Cliquez sur le nom du patient pour modifier son profil.

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Brenda Patient 5 (Date de naissance: 6/17/1980) Profil Dispositifs Liste des patients

Renseignements généraux Modifier Coordonnées Traitement du diabète Modifier

Brenda Patient 5
6/17/1980
Femme
ID: TTCCAP5

Adresse électronique
ttc.ca.patient5@example.org

Canada

Langue
Langue : Français

Gestion du diabète

Pour gérer mon diabète :
Je surveille mon régime alimentaire et mon activité physique

OneTouch Reveal® personnalisera les conseils en fonction de ces renseignements.

Supprimer un patient de la clinique

Supprimer

Clinicien princpal:
Clinic Manager, TTC

Type de diabète:
Type 2 (par défaut)

Plages d'obj.

Avant le repas	4.0	7.0	mmol/L
Après le repas	5.0	10.0	mmol/L
Plage globale	4.0	10.0	mmol/L
Hypoglycémie grave	2.8		mmol/L
Hyperglycémie grave	20.0		mmol/L

Insulin Mentor^{MC}

Activer et configurer Insulin Mentor^{MC} pour ce patient. Une fois activé, Insulin Mentor^{MC} sera accessible dans l'application mobile OneTouch Reveal® du patient.

Avant de l'activer, assurez-vous que votre patient sait compter les glucides et calculer un bolus d'insuline, et discutez de l'ajustement des paramètres d'Insulin Mentor^{MC} qui répondra le mieux aux besoins et aux capacités de votre patient.

Cliquez sur **Dispositifs** pour afficher la liste et sur Modifier (à droite de chaque dispositif) pour modifier le nom du dispositif d'un patient. Cliquez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé.

Modifier : Cliquez sur l'un des hyperliens **Modifier** pour modifier l'information (Renseignements généraux, Coordonnées, Langue, etc.)

Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer le profil d'un patient.